


# ANIOS'CLEAN EXCEL D



Nettoyant  
pré-désinfectant  
des instruments

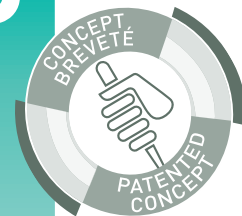

- Concept breveté
- Association originale de principes actifs en synergie
- Haut niveau de détergence démontré
- Non corrosif, compatible avec un large panel de matériaux

## INDICATIONS


Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

## CARACTERISTIQUES

- Détergent et désinfectant visant à réduire les risques de formation de biofilm à la surface des dispositifs médicaux
- Large spectre antimicrobien pour limiter les risques de contamination croisée et assurer la sécurité du personnel
- Efficacité antimicrobienne démontrée y compris sur BMR et BHR
- Formulation efficace en eau douce et en eau dure
- Formulation non corrosive et compatible avec un large panel de matériaux
- Amélioration du profil écotoxicologique : réduction des émissions de GES\* de 47% par rapport à un produit de même application
- Bonne rinçabilité
- Peut être utilisé en bac à ultra sons
- Solution limpide de couleur bleue
- pH produit pur : mini 6.5 - maxi 7.5
- pH à dilution (0.5%) en eau de réseau : environ 7.4
- Parfum citron

\* Gaz à Effets de Serre


**PRODUIT  
A DILUER**  
25 ml > 5L

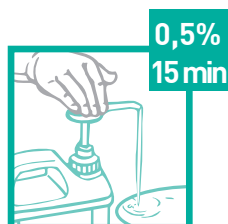

# ANIOS'CLEAN EXCEL D

## Nettoyant pré-désinfectant des instruments


### MODE D'EMPLOI

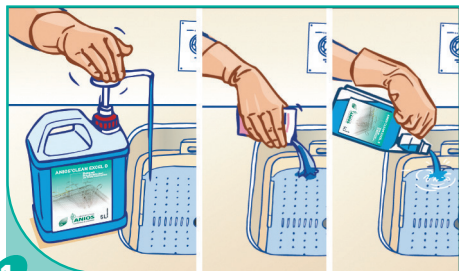

1

#### Dilution à 0,5 % :

Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède du réseau. Renouveler le bain de trempage au moins une fois par jour.

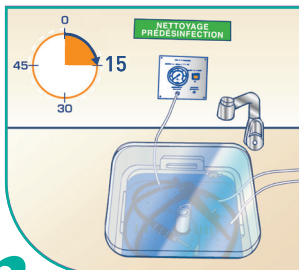


2

Immerger complètement le dispositif médical.

#### Temps de trempage conseillé : 15 min.


Brosser si présence de souillures apparentes. Pour le matériel endoscopique : écouvillonner.

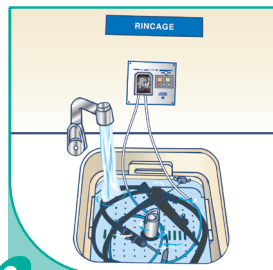

3

Rincer abondamment les dispositifs médicaux à l'eau de réseau (bonne qualité microbiologique) pour éliminer toute trace de produit et souillure organique.

Pour le matériel endoscopique : extérieur et intérieur.

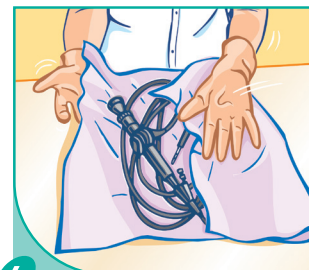

4

Essuyer avec un champ propre. Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement).

### COMPOSITION

Chlorure de didécyldiméthylammonium, digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, parfum, colorant, excipients.

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

Dangereux. Respecter les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage : de +5°C à + 35°C. Dispositif médical de la classe IIb (Directive 93/42/CEE modifiée).

### CONDITIONNEMENTS

200 doses de 25 ml.....Réf. 2416.097

1 12 flacons de 1 litre doseur.....Réf. 2416.095

2 4 bidons de 5 litres + pompe 25 ml.....Réf. 2416.036

### PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

| Actif sur     | Normes                                                                               | Temps de contact  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Bactéries     | EN 13727, EN 14561                                                                   | 5 minutes - 0.5%  |
|               | EN 13727 sur BMR                                                                     | 15 minutes - 0.5% |
| Mycobactéries | EN 14348, EN 14563 (M. terrae)                                                       | 60 minutes - 2%   |
| Levures       | EN 13624, EN 14562                                                                   | 15 minutes - 0.5% |
| Virus         | PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Herspesvirus, Vaccinia virus, HIV-1 | 5 minutes - 0.5%  |

L'ensemble des activités antimicrobiennes du produit est inclus dans le dossier scientifique, disponible sur simple demande.

