

## BECHTOL PREMIUM

### Produit désinfectant pour instruments Concentré 2en1



Concentré haute performance de nouvelle génération pour la désinfection et le nettoyage des instruments médico-chirurgicaux.

Action antimicrobienne courtes en 15 minutes/2 % et en 30 minutes/1%.

#### **Champ d'action :**

- Bactéricide (y compris le SARM) et levuricide en 15 minutes en solution à 2% et en 30 minutes en solution à 1% (EN 13727/13624)
- Tuberculocide (*M. terrae*) en 15 mn à 3% et en 30 minutes en solution à 2% (EN 14348)
- sporicide en 30 mn à 3% et en 60 minutes en solution de travail à 1% (EN 13704)

- Testé selon les directives de la DGHM (statut 4/2015) sous fortes charges organiques
- Inactivation complète du virus (HBV / HCV / HIV / BVDV / Vaccinia / HPV / Adeno / Polio) en 15 minutes dans une solution à 3% (EN 14476)
- Efficace contre les virus Rota et Noro en 15 minutes en solution à 3%
- Sans aldéhydes et phénols
- Convient pour une utilisation dans un bain à ultrasons en 5 minutes en solution à 3%
- Excellente compatibilité avec les matériaux.

## **Composition**

- 100 g de concentré Bechtol Premium contiennent:
- 8,0 g de chlorure de benzalkonium
- 4,0 g de dodécyldipropylenetriamine

## **Durée de conservation**


36 mois

## **Mode d'emploi :**

- ❖ Pour préparer une solution de 3%, mélanger 970 ml d'eau avec 30 ml de concentré.
- ❖ Pour préparer une solution de 2%, mélanger 980 ml d'eau avec 20 ml de concentré.
- ❖ Pour préparer une solution de 1%, mélanger 990 ml d'eau avec 10 ml de concentré.
- ❖ Immédiatement après l'usage tremper les instruments dans le bain de Bechtol Premium instruments.
- ❖ RM : Pour les instruments très souillés les placer dans de l'eau tiède et nettoyer avec une brosse souple.
- ❖ S'assurer que les instruments soient immergés complètement dans la solution. Eviter la formation de bulles. Respecter le temps d'immersion. Enlever les instruments du bain, rincer et sécher avec un tissu propre.

Mode d'emploi :

### METHODE CONVENTIONNELLE :

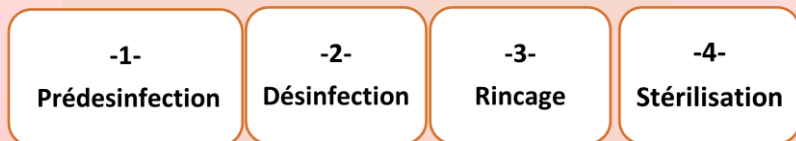

Description de mode d'emploi :

**\*Étape de pré désinfection :** Nettoyer le dispositif médical avec un produit détergent pré désinfectant. Rincer soigneusement.

**\*Étape de désinfection :**

- ❖ Si la solution est prête à l'emploi : verser un volume bien précis dans le bain
- ❖ Si la solution est concentrée : suivi la dilution recommandée
- ❖ Immerger entièrement les dispositifs médicaux dans le bain, brosser les dispositifs médicaux, et les écouvillonner si nécessaire, respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée.

**\*Étape de rinçage :**

Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau, puis essuyer avec un champ à usage unique.

### PROTOCOL EUROPEEN:



**\*Étape de désinfection :** Faire une dilution de concentré de BECHTOL PREMIUM

- ❖ Pour préparer une solution de 3%, mélanger 970 ml d'eau avec 30 ml de concentré.
- ❖ Pour préparer une solution de 2%, mélanger 980 ml d'eau avec 20 ml de concentré.
- ❖ Pour préparer une solution de 1%, mélanger 990 ml d'eau avec 10 ml de concentré.
- ❖ Immédiatement après l'usage tremper les instruments dans le bain de Bechtol premium instruments.
- ❖ RM : Pour les instruments très souillés les placer dans de l'eau tiède et nettoyer avec une brosse souple.
- ❖ S'assurer que les instruments soient immergés complètement dans la solution. Éviter la formation de bulles. Respecter le temps d'immersion.

**\*Étape de rinçage :**

Rincer abondamment sous l'eau claire courante et sécher avec un chiffon propre.

